


### Stap 1: Start



- Open de verpakking.
- Haal het wattenstokje en het buisje er uit.
- **Belangrijk!** De locatie van afname (wond, keel of vagina) is afhankelijk van het advies van de arts. Het wattenstokje is te gebruiken voor één van de afnames bij de volgende stap.

### Stap 2a: Afname - Wondkweek

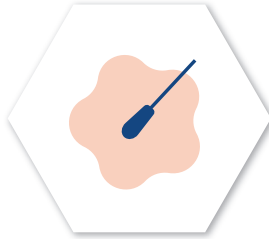

- Maak de wond schoon met fysiologisch zout.
- Neem een kweek af door wattenstokje over de bodem van de wond te strijken.
- Ga voor deze afname verder naar stap 2b.

of

### Stap 2a: Afname - Keelkweek



- Neem met het wattenstokje een keeluitstrijk af.
- Steek het wattenstokje zo diep mogelijk achter in de keel en draai deze terwijl er van links naar rechts over de achterwand van de keel gestreken wordt.
- Ga voor deze afname verder naar stap 2b.


of

### Stap 2a: Afname - Vagina



- Neem een vaginawek af door het wattenstokje ongeveer 5 cm in de vagina te brengen.
- Draai het wattenstokje langs de vaginawand.
- Ga voor deze afname verder naar stap 2b.

### Stap 2b: Afname

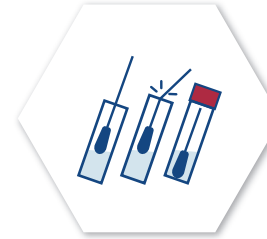

- Stop het wattenstokje in het buisje. Breng het streepje op het stokje (breuklijn) op gelijke hoogte met de bovenrand.
- Zet het stokje tegen de rand van het buisje. Buig het uitstekende gedeelte en breek het stokje af
- Gooi het uiteinde weg. Draai de dop weer goed vast.

### Stap 3: Identificatie afnamebuis



- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en \*herkomst van het lichaamsmateriaal in op de het bijvoegde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afnamebuis.


### Stap 4: Verzendklaar maken en verzenden




- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.

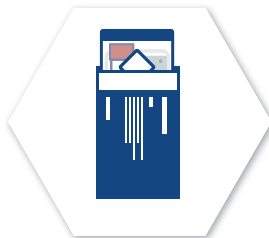

- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendenvolp.

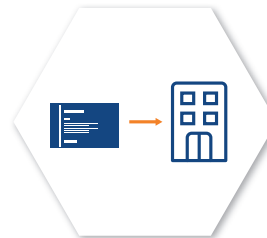

- Geef de verzendenvolp op de dag van afname af bij de afnamelocatie (voorkeur) of verstuur per post.\*