

Overzichtsfolder afnamematerialen



■ Feces microbiologie (MMB)

Diagnostiek:

PCR/kweek op bacteriën, virussen en parasieten

Let op:

Doe het potje niet te vol en draai de dop goed dicht.

Potje voor driekwart vullen

Temp. transport:

2-8°C

Verzendinstructie:

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post *



■ Feces Calprotectine en iFOBT (KC)

Diagnostiek:

iFOBT (Occult bloed) en Calprotectine

Let op:

Buisje niet meer openen nadat het staafje met de feces in de vloeistof is gedaan

Temp. tot transport:

Kamertemperatuur

Verzendinstructie:

op de dag van productie/verzamenen inleveren bij laboratorium/ afnamepunt of brievenbus



■ Urine set (KC en MMB)

Urinepotje:

Voor het verzamelen van urine

1. Diagnostiek Geel/Zwarte Dop: Urinebuisje met boorzuur voor kweek

2. Diagnostiek Witte Dop: Albumine in urine + ACR; Chemie

3. Diagnostiek Geel / Rode Dop: Stabilur, Dymorfe ery's en celcilinders

4. Diagnostiek Geel / Gele Dop: Urine strip

Let op:

Vul de buis altijd binnen 1 uur na productie van de urine.

Het urinepotje kan worden weggegooid

Temp. tot transport:

2-8°C

Verzendinstructie:

Zie afnameinstructie



■ SOA Urine / Moleculaire diagnostiek (MMB)

Diagnostiek:

PCR op Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium en Trichomonas vaginalis

Let op:

Vul het buisje met eerste straal urine tot tussen de aangegeven vullijnen (circa 4 ml.)

Temp. tot transport:

2-8°C

Verzendinstructie:

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post *



■ SOA Swab / Moleculaire diagnostiek (MMB)

Diagnostiek:

PCR op Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium en Trichomonas vaginalis

Let op:

Keeluitstrijk: niet zinvol om Trichomonas vaginalis en Mycoplasma genitalium op te bepalen

Temp. tot transport:

2-8°C

Verzendinstructie:

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post *



Uitstrijk (MMB)

Diagnostiek:

Kweek op bacterien, gisten/schimmels en PCR op virussen en bacterien.

Let op:

Swab afbreken op afbreekpunt.

Temp. transport:

2-8°C **Let op:** kweek voor *Neisseria gonorrhoeae* niet in koelkast bewaren en zo snel mogelijk naar het lab brengen

Verzendinstructie:

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post *



SARS-COV-2 set (MMB)

Diagnostiek:

SARS-COV-2, RSV, Influenza

Let op:

Swabs afbreken op afbreekpunt.

Temp. tot transport:

In de koelkast

Verzendinstructie:

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post *



Nasopharynx-swab (MMB)

Afnamemateriaal:

eSwab

Diagnostiek:

Kweek op bacterien, gisten/schimmels en PCR op virussen en bacterien.

Let op:

Swab afbreken op afbreekpunt.

Temp. tot transport:

2-8°C

Verzendinstructie:

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post *



MRSA set (MMB)

Diagnostiek:

MRSA/BRMO

Let op:

Bij screening na bezoek buitenlands ziekenhuis, ook extra rectumuitstrijk insturen voor BRMO. Bij screening op MRSA; Indien wonden of Cad aanwezig tevens wonduitstrijk en/of urinekweek insturen.

Temp. tot transport:

2-8°C

Verzendinstructie:

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post *



Steriele container

Afnamemateriaal:

Bijvoorbeeld nagel, sputum, punctaten

Diagnostiek:

Kweek op bacterien, gisten/schimmels en/of PCR op virussen en bacterien.

Temp. tot transport:

2-8°C

Verzendinstructie:

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post *



Cervixcytologie Thinprep PAP

Diagnostiek:

Let op:

Temp. transport:

Verzendinstructie:

Humaan Papillomavirus

Deze afnameset NIET gebruiken voor het
Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker.

2-30°C

Verzenden op dag van afname via de logistieke dienst of
via inleverlocatie (voorkeur) of versturen per post*.



Histologie (PA)

Diagnostiek:

Let op:

Temp. transport:

Verzendinstructie:

Weefsel ten behoeve van pathologie

Een biopt per potje. De potjes van één patiënt samen in één
verzendingvelop. Enkel geschikt voor klein materiaal.

Kamertemperatuur

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur)
of versturen per post *



Histologie bioptstans

Diagnostiek:

Let op:

Weefsel ten behoeve van pathologie

Een biopt per potje. De potjes van één patiënt samen in
één verzendingvelop. Enkel geschikt voor klein materiaal.

Vragen?

SCAL Medische Diagnostiek

Rooseveltstraat 18
2321 BM Leiden
071 - 516 00 20
www.scal.nl

Voor overleg met specialisten en vragen
kunt u bellen met: **071 - 5160022**

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08:00 - 16.30 uur.

Een CITO aanvragen kan op werkdagen van 08.00 - 15.00 uur.

Ondanks dat wij met zorg dit overzicht hebben opgesteld, kunnen er zich altijd wijzigingen voordoen. Maak daarom bij voorkeur gebruik van de versie op de website of controleer of uw versie de meest actuele is. Indien gewenst kunt u altijd een nieuwe kaart bestellen wanneer uw versie verouderd is. SCAL accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, noch voor schade, overlast of ongemak dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de informatie of van een verouderde versie. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u graag door naar onze website **www.scal.nl**

*Door oncontroleerbare omstandigheden kan verzending per post ten koste gaan van de kwaliteit. In het weekend en op feestdagen kunt u medische post in de speciale brievenbus doen voor medisch materiaal. Deze wordt ook op zondag gelegegd. In deze locatiewijzer zie je waar u deze brievenbussen vindt: <https://www.postnl.nl/locatiewijzer/>. Filter op 'Brief posten' en kies voor 'Medisch'. Laat u patiënten diagnostisch materiaal versturen? Vertel dan welke brievenbus ze kunnen gebruiken.