

Stap 1: Start



- Open de verpakking.
- Neem het wattenstokje en het buisje er uit.

Stap 2: Afname



- Neem materiaal af uit de nasofarynx met behulp van de flexibele eswab.
- Breng de swab over de neusbodem tot in de nasopharynx en draai die voorzichtig om zijn as.



- Stop het wattenstokje in het buisje. Breng het streepje op het stokje (breuklijn) op gelijke hoogte met de bovenrand.
- Zet het stokje tegen de rand van het buisje. Buig het uitstekende gedeelte en breek het stokje af.
- Gooi het uiteinde weg. Draai de dop weer goed vast.

Stap 3: Identificatie afnamebuis



- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en *herkomst van het lichaamsmateriaal in op de het bijvoegde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de buis.

Stap 4: Verzendklaar maken en verzenden




- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendvelop.

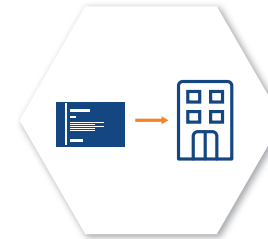

- Geef de verzendvelop op de dag van afname af bij de afnamelocatie (voorkeur) of verstuur per post.*