


### Stap 1: Start

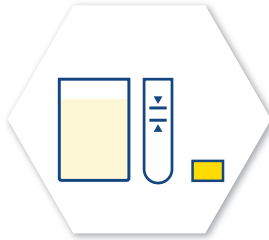

- Open de verpakking.
- Haal de pipet en het buisje er uit.

### Stap 2: Afname



- Neem bij voorkeur het eerste gedeelte van de ochtendurine af. (U mag minimaal 2 uur daarvoor niet geürineerd hebben.)
- Vang vervolgens het eerste gedeelte van de urine op in een schone beker. U kunt daarna uitplassen in de WC.
- Draai de dop van de bijgeleverde buis. (**PAS OP:** er zit vloeistof in.)

### Stap 3: Buisje vullen



- Breng met de pipet urine uit het potje over in het buisje met de transportvloeistof.
- Vul het buisje met urine tot dat de vloeistof tussen de strepen zichtbaar is.
- Draai de dop vervolgens weer goed vast.

### Stap 4: Identificatie afnamebuis



- Vul de patiëntgegevens en datum van afname in op het etiket.
- \*Invullen van herkomst van het lichaamsmateriaal is voor deze afname niet noodzakelijk.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afnamebuis.

### Stap 5: Verzendklaar maken en verzenden




- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendenvelop.

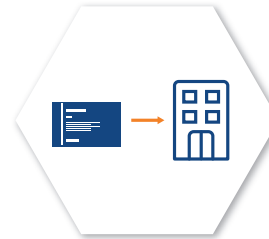

- Geef de verzendenvelop op de dag van afname af bij de afnamelocatie (voorkeur) of verstuur per post.\*