


Instructie SARS coronavirus 2 / Influenza / RSV


Stap 1: Start

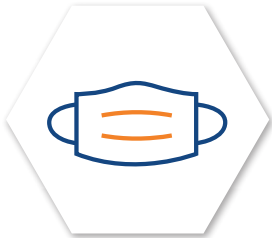

Bescherm uzelf tijdens het afnemen door het dragen van:


- Mondneusmasker (minimaal FFP1)
- Bril
- Schort
- Handschoenen

Stap 1: Start

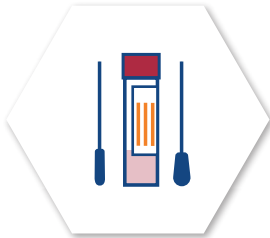


- Open de verpakking.
- Label het transportmedium.
- Schrijf op het etiket de voorletters, naam, geboortedatum en afnamedatum. Plak het etiket op de buis.

Stap 2a: Afname - Keeluitstrijk

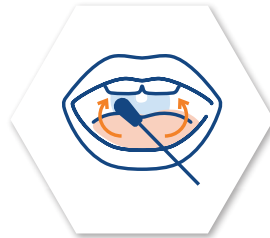

- Neem met de grotere swab de keeluitstrijk af.
- Steek de swab zo diep mogelijk achter in de keel en draai de wattenstok terwijl er van links naar rechts over de achterwand van de keel gestreken wordt.

Stap 2b: Afname

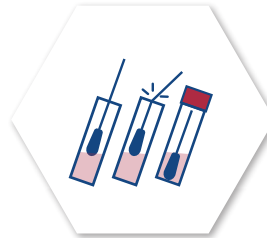


- Stop het wattenstokje in het buisje. Breng het streepje op het stokje (breuklijn) op gelijke hoogte met de bovenrand.
- Zet het stokje tegen de rand van het buisje. Buig het uitstekende gedeelte en breek het stokje af.
- Gooi het uiteinde weg. Draai de dop weer goed vast.

Stap 2c: Afname - Neusuitstrijk



- Neem met behulp van de fijnere swab materiaal uit de nasofarynx af.
- Breng de swab over de neusbodem tot in de nasopharynx (lichte weerstand) en draai de swab voorzichtig om zijn as.

Stap 2d: Afname

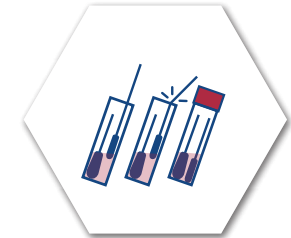

- Stop het wattenstokje in het buisje. Breng het streepje op het stokje (breuklijn) op gelijke hoogte met de bovenrand.
- Zet het stokje tegen de rand van het buisje. Buig het uitstekende gedeelte en breek het stokje af.
- Gooi het uiteinde weg. Draai de dop weer goed vast.


Stap 3: Verzendklaar maken en verzenden



- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.

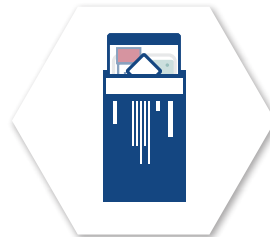

- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendenvelop.

SARS coronavirus 2 PCR: Dit onderzoek is los aan te vragen of in combinatie met Influenzavirus en RSV.

Influenza of RSV: dit onderzoek is een combinatie van Influenzavirus, RSV en SARS-coronavirus 2 (influenzavirus A, influenzavirus B, RSV en SARS-CoV2 worden bepaald uit hetzelfde afnamemateriaal). Bij aanvragen van alleen influenzavirus of RSV worden alle drie de verwekkers gerapporteerd.