


### Notitie

- Uw (huis)arts heeft u voor onderzoek van uw ontlasting verwezen naar SCAL. Met deze iFOBT test kan bepaald worden of er (onzichtbare) spoortjes bloed in uw ontlasting aanwezig zijn.
- Neem de ontlasting af op de dezelfde dag dat u het inlevert bij of opstuurt naar SCAL.

### Stap 1: Start

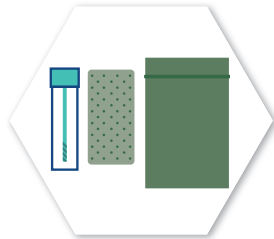

- In deze afnameset vindt u:
  - Opvangpapier voor het opvangen van de ontlasting;
  - Afnamebuisje voor het verzamelen van de ontlasting;
  - Verzendmateriaal: absorptiemateriaal, safetybag en retourenvelop.

### Stap 2: Ontlasting opvangen




- Gebruik altijd het opvangpapiertje voor opvang van de ontlasting. Dit voorkomt contact met water en vervuiling met urine en schoonmaakmiddelen uit het toilet.



- Plak het opvangpapier op de toiletbril. Volg hiervoor de instructies op het opvangpapier.
- Laat wat ontlasting vallen op het papiertje.


### Stap 3: Afname: Ontlasting verzamelen

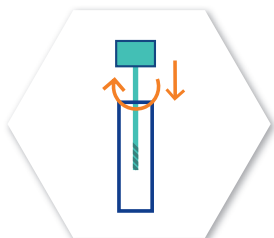


- Maak het buisje open door de groene dop linksom te draaien.
- Trek de dop omhoog.



- Aan het dopje zit een staafje met groeven, daarmee kunt u het monster nemen.

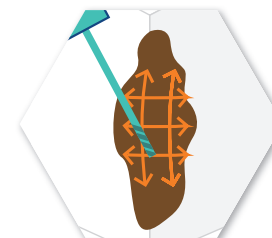

- Haal het staafje (alleen het geribbelde gedeelte) vier keer door de ontlasting.
- Als de ontlasting erg hard is, kunt het staafje 5 á 6 keer in de ontlasting prikken.

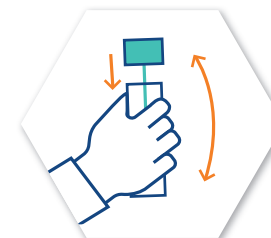

- Stop het staafje terug in het buisje.
- Druk het dopje stevig aan, tot de klik.
- Schud het buisje een aantal keer.



- Maak de plakranden op de toiletbril los en laat het opvangpapier met de ontlasting in het toilet zakken.
- Wacht even tot het papier zacht wordt en spoel door.

## Stap 4: Gegevens noteren



Noteer op de sticker op het buisje bij:

N: uw naam.

A: uw geboortedatum.

S: uw geslacht (M = man, F= vrouw). Doorhalen wat niet van toepassing is.


D: de datum waarop u de ontlasting geproduceerd heeft.

**LET OP:** Buisjes zonder bovenstaande gegevens en aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen.

## Stap 5: Verzendklaar maken en verzenden




- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

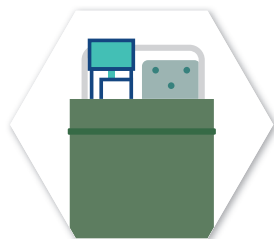

- Stop het buisje samen met het absorptiemateriaal in het groene zakje.
- Verwijder de plakstrip van het groene zakje en plak het zakje dicht.



- Doe het groene zakje samen met het aanvraagformulier in de retourenvelop en plak de envelop dicht.

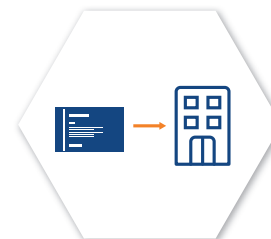

- Geef de retourenvelop op de dag van afname af bij de afnamelocatie (voorkeur) of verstuur per post.\* Frankeren is niet nodig.