

Stap 1 Start





- Open de verpakking.
- Neem het wattenstokje en het buisje eruit.

Stap 2 Afname



- Neem materiaal af uit de nasopharynx met behulp van de flexibele eswab.
- Breng de swab over de neusbodem tot in de nasopharynx en draai die wat voorzichtig om zijn as.

Stap 3 Identificatie afnamebuis

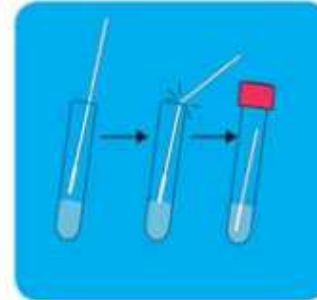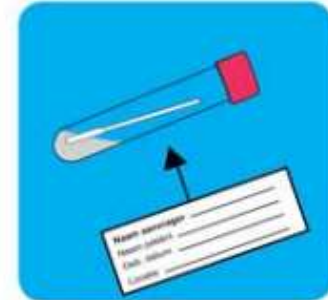

- Breng het wattenstokje na het maken van de kweek in de buis en breek het aan de bovenkant van de buis af.
- Draai de dop goed vast.

- Vul de patiëntgegevens in op het bijgeleverde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afname buis.

Z.O.Z.


Stap 4 Verzendklaar maken en verzenden



- Vouw het door de arts ingevulde formulier dubbel.



- Wikkel het absorptiepapier om de buis heen.

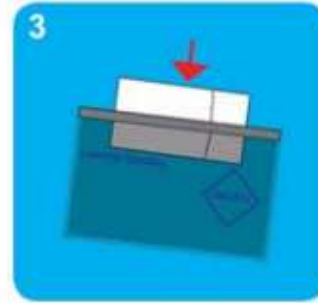

- Stop de afnamebuis en het absorptiepapier in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvelop.
- Lever de envelop nog dezelfde dag in op één van onze afnamelocaties. Of doe deze op de post.

Wij vragen u om de envelop altijd terug te brengen, ook als u beslist geen materiaal in te leveren.