


Stap 1 Afname




- Desinfecteer voor het afnemen de handen en draag handschoenen tijdens de afnamen.
- Trek voorzichtig het onderste ooglid naar beneden en strijk van binnen naar buiten over de conjunctiva (overgang tussen oog en ooglid).
- Noteer eventueel wanneer er van beide ogen een uitstrijk afgenomen wordt de afname locatie.

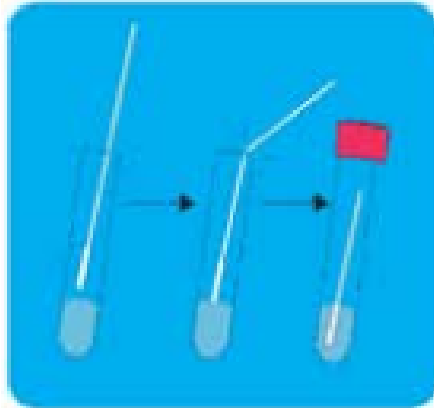

- Breng de wattenstok na het afnemen van de kweek in de buis en breek de stok op de breekrand, ter hoogte van de zwarte streep.

Stap 2 Identificatie

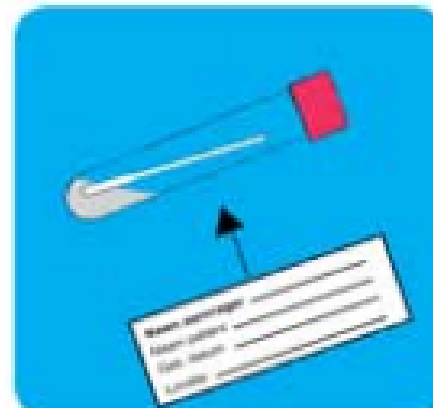


- Vul de patiëntgegevens en locatie van herkomst in op het formulier.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afnamebuis.

Z.O.Z.


Stap 3 transport




- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

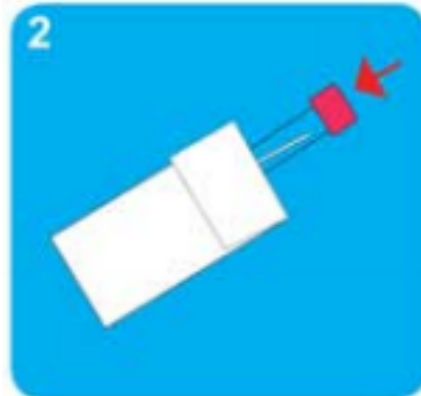

- Wikkel de afnamebuis in het absorptiepapieretje.

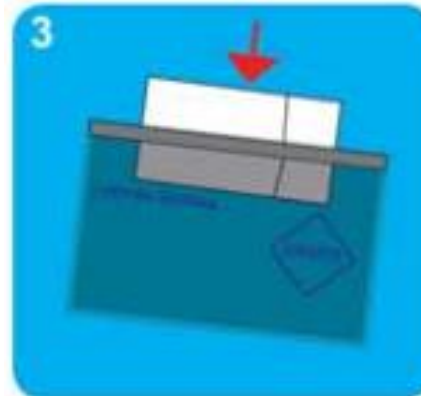

- Stop de afnamebuis en het absorptiepapieretje in de safetybag (plastic zak).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.

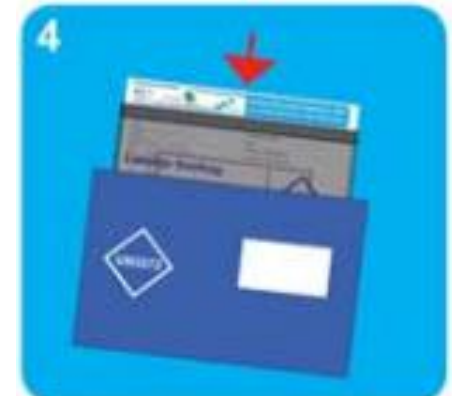

- Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvelop.
- Lever de envelop nog dezelfde dag in op één van onze afnamelocaties. Of doe deze op de post.

Wij vragen u om de envelop altijd terug te brengen, ook als u beslist geen materiaal in te leveren.